



## **LifeMax Gondoskodó Applikáció (Használati útmutató)**

### **Letöltés:**

-Android Google Play áruházból

Rendszerkövetelmény: Minimum Android 12-es verzió.

-iOS Apple Appstore-ból

Rendszerkövetelmény: Minimum iOS 13-as verzió.

Az applikáció ingyenes és havidíjmentes.

**A letöltést követően regisztráció szükséges.**

### **Regisztráció menete:**

**FONTOS!!! A regisztrációhoz egy valós használatban lévő e-mail cím szükséges!!**

A csillaggal(\*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

2023.11.03

## Regisztráció:




Letöltést követően, ha elindítjuk a Gondoskodó Applikációt ez a képernyő fogad minket.

Itt lehetőségünk van : -Bejelentkezni.

-Jelszó emlékeztetőt kérni.

-Létrehozni egy fiókot.

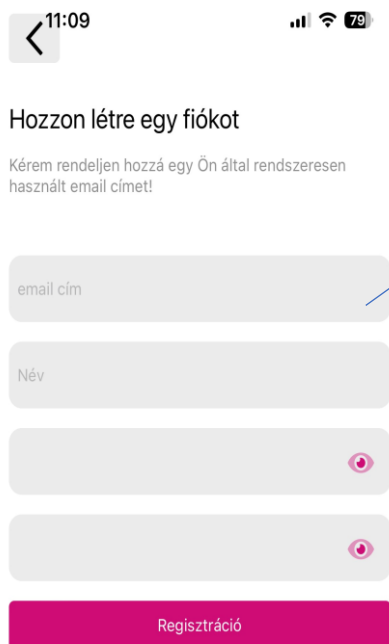

A regisztrációhoz szükséges megadni egy e-mail címet, nevet, és jelszót. Ezután a „Regisztráció” gombbal véglegesítjük a regisztrációt.

## Gondoskodó Applikáció Első Bejelentkezés:




Sikeres regisztráció, és bejelentkezés után engedélyeznünk kell a helymeghatározást



Fő képernyő az alábbi menüpontokkal:  
-Értesítések.  
-Térkép.  
-Diszpécser.  
-Beállítások.

## Menüpontok /Használat:

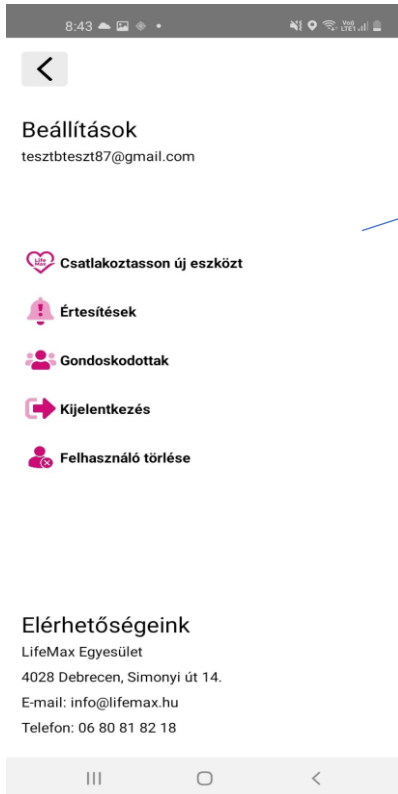


Javasolt a „Beállítások” menüponttal kezdeni.

-Itt tudunk új eszközöket csatlakoztatni

-Értesítéseket beállítani

-Megtekinteni a „Gondoskodottak”-at.

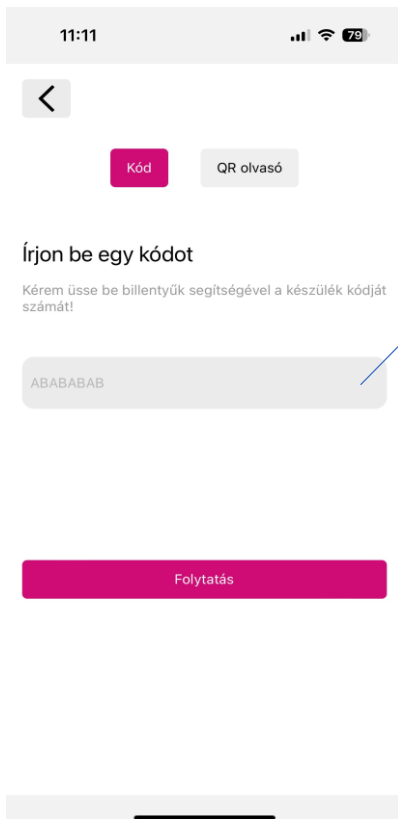

Csatlakoztasson új eszközt:

Itt tudjuk összekapcsolni a Gondoskodó Applikációt a Segélyhívó Applikációval.

Ehhez nincs másra szükség mint a Segélyhívó applikációban található „Kapcsoló kód”-ot bemásoljuk a Gondoskodó applikációba.



### Értesítések

Válassza ki, hogy mely jelzéstípus leadásakor szeretne értesítést kapni!

- SOS
- Elesés
- Akkumulátor kritikus
- Zóna elhagyás

Mentés

Értesítések:  
Lehetőségünk van beállítani milyen eseményekről szeretnénk értesítést kapni.



### Ügyfelek

Válassza ki, hogy melyik csatlakoztatott eszköz adatait szeretné látni!

- BteszTeszt  

Gondoskodottak:  
Az applikáció itt listázza ki az összes összekapcsolt segélyhívó eszközt.

Ezzel a gombbal tudja leválasztani a segélyhívó eszközt.

Az adatlap szerkesztésébe itt tud belépni a Gondoskodó.

10:31

BteszTeszt

**Cím**

Utca

Város

Irányító szám

**Orvosi információk**

Tevékenységek

Születésnap

1955.02.02

Értesítendő 2 neve

Értesítendő 2 telefonszáma

Értesítendő 3 neve

Értesítendő 3 telefonszáma

Diszpécserok értesítése:

Diszpécserok értesítése SOS hívás esetén

Diszpécserok értesítése elesés esetén

Diszpécserok értesítése Geo kerítés esetén

Törlés

#### Adatlap szerkesztése:


A jobb felső ceruza ikonra koppintva nyílik meg a szerkesztés lehetősége. Fotó is feltölthető a gondoskodotról, hogy ha többen is gondoskodnak egy személyről mindenkinek ugyan az a fotó jelenik meg. Egyéni beállításra nincs mód.

Minden itt módosított adat a diszpécserközpontban kerül jóváhagyásra.

A térkép ikonra kattintással a GEO-kerítés hozzáadását biztosító felület jelenik meg, bővebben a „Geo-kerítés” pontban.

Az adatlap szerkesztőben van mód arra is, hogy az adott segélyhívó készülék vonatkozásában ki-be kapcsoljuk a diszpécserközpontot. Ha kikapcsolja egy adott jelzéstípusnál, az olyan típusú jelzésről NEM kap a központ értesítést, ahhoz diszpécseri szolgáltatás nem lesz. Alapvetően a GEO kerítésnél van csak kikapcsolva.

## Geo-kerítés:

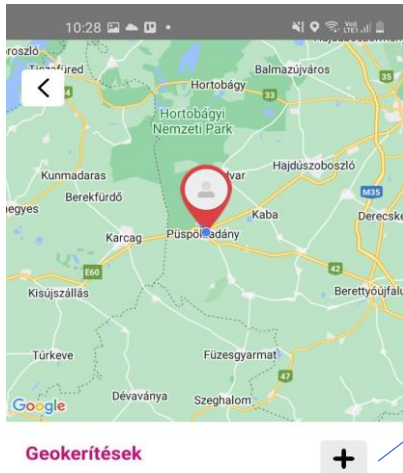

Geo-kerítés:

Működéséről lásd. (Segélyhívó Applikáció leírás->Szolgáltatás folyamata->Geo-kerítés használata.

Jelenleg nincs egy darab Geo-kerítés sem beállítva az applikációnkban, ha lenne akkor itt lenne ki listázva.

A „+”-ikonra vagy a „Hozzáadás”-ra nyomva tudunk új Geo-kerítést hozzá adni.


A gondoskodotthoz nem tartozik hozzárendelt geokerítés

Hozzáadás

Értesítések Térkép Diszpécser Beállítások



A térképen a megfelelő helyre koppintva, majd megadva a kör sugarát és elnevezését már el is menthető a biztonsági zóna. Ennek pontossága minden esetben a használt JELZŐESZKÖZ-GPS-ének a pontosságától függ. Mobil esetén, ha nincs megosztva a helyzetmeghatározás akkor a GEO kerítés funkció haszontalan.

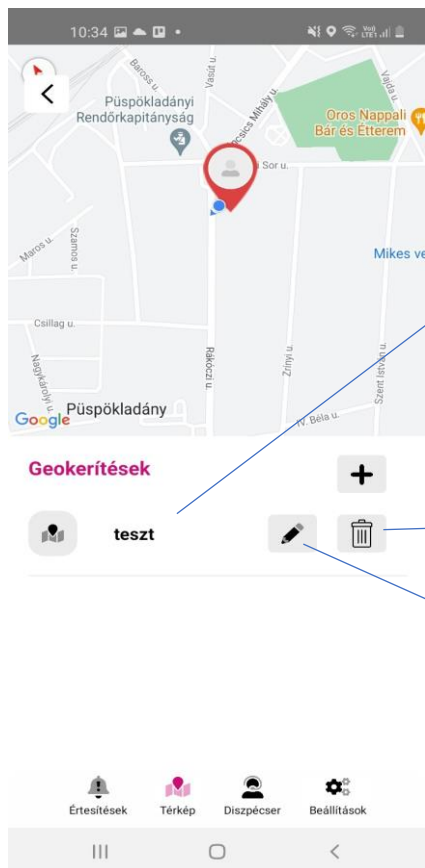


A hozzáadott Geo-kerítésünk bekerült a listába.

Geo-kerítés törlése.


Geo-kerítés módosítása.

## Csatlakozott Segélyhívó eszközök:

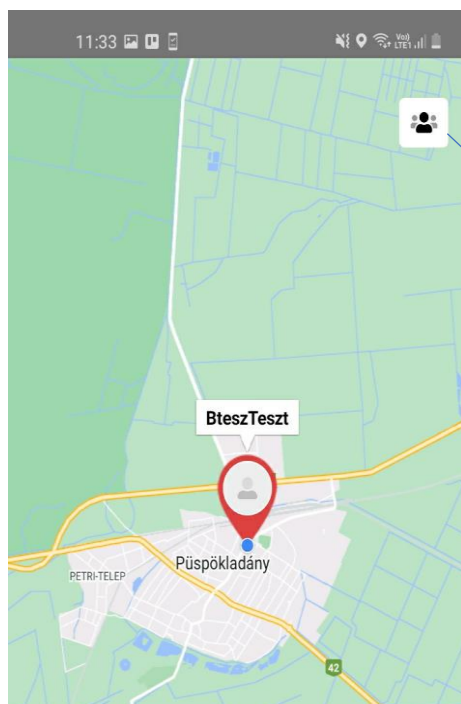

Erre az ikonra kattintva listázza ki a térképen az összes csatlakoztatott segélyhívó eszközt.



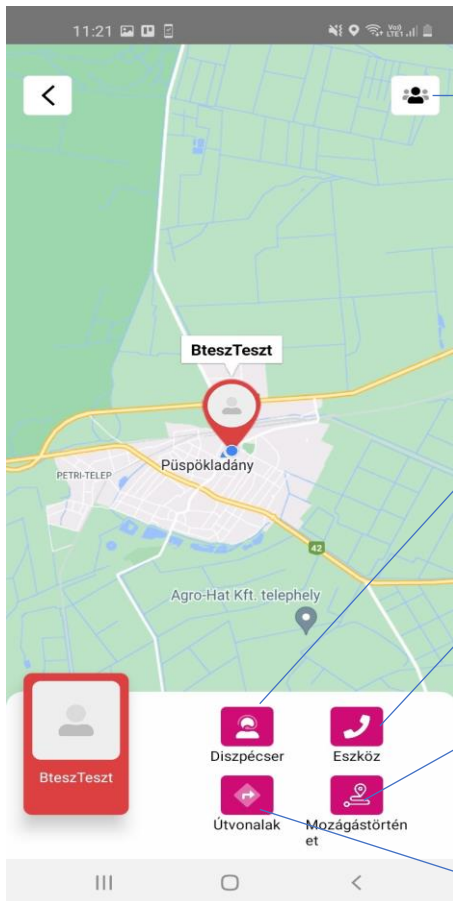

A jobb felső ember ikonra kattintva kiválaszthatunk egy gondoskodottat ha több is van hozzáadva.


Diszpécser: Ezzel a gombbal a felhasználó hívni tudja a diszpécsterszolgálat ügyelti számát. Csak fontos és indokolt esetben használandó.

Eszköz: Ezzel a gombbal a csatlakoztatott segélyhívó eszközt hívja a gondoskodó.

Mozgástörténet: az utolsó 30 napra vonatkoztatva napi bontásban térképre vetítve megmutatja a segélyhívó eszköz által bejárt utat.

Útvonalak: az app megtervezi a legrövidebb útvonalakat a Gondoskodó és a segélyhívó eszköz között.

## Diszpécser:

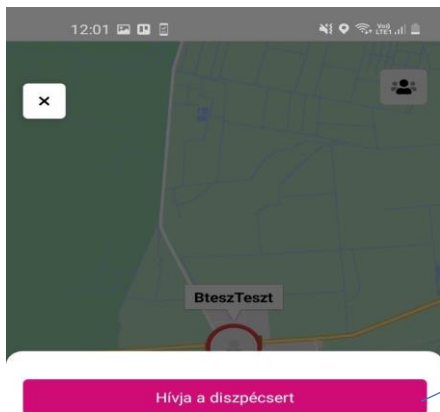

Diszpécser: a főképernyő diszpécser ikonjára kattintással előugrik a diszpécsterszolgálat hívó gomb, és alatta a laikus elsősegélynyújtás lépései.

### Teendők segítségnyújtás esetén

#### Helyzetfelismerés


Biztonságos-e számunkra a helyszín? (pl.: tűz, kutya, elektromos feszültség, közlekedési eszközök, veszélyes úttest stb.)  
 Igen, biztonságos megközelítjük a sérültet!  
 Nem, biztonságos a helyszín, hívom a 112-t és segítséget kérek!

#### Eszmélet vizsgálat

Megszólítom (pl.: Jó napot! Hall engem?), ha szükséges enyhén megrázom!  
 Igen, eszméleténél van. Kikérdezem és megvizsgálom a beteget: Mi, mikor, meddig, hogyan történt? Hol fáj, milyen erősségű a fájdalom, kisugárzik-e valahova?  
 Vérzés, sérülés, deformitás? Szed-e gyógyszert, bevette-e? Láz, fejfájás, köhögés, szédülés, zibbadás,



## Értesítések:

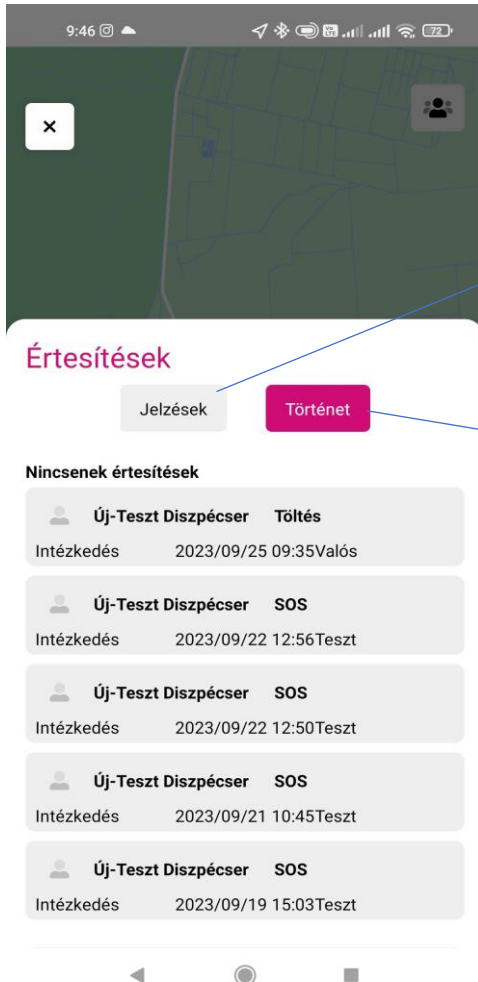

A főképernyő csengő ikonjára kattintással jönnek fel az értesítések.

Jelzések: aktív az utolsó 30 percben leadott jelzés. Maximum 30 percig látható a listában.

Történet: korábbi, már kezelt vészjelzések.